


# TERHESSÉGI (hCG) GYORSTESZT (VIZELETSUGARAS)

A TESZT CSAK KÜLSŐLEG, DIAGNOSZTIKAI CÉLRA, ÖNELLENŐRZÉSRE HASZNÁLHATÓ!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

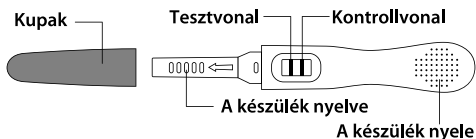

A TESZT ALKALMAZÁSA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

1. Ne használjon lejárt tesztet! (A szavatossági idő a csomagoláson látható, hónap/év.)
2. A teszt szobahőmérsékleten (2 és 30 Celsius fok között), száraz helyen tárolható. A műanyagtasak a felbontásakor legyen szobahőmérsékletű.
3. Ne hűtse a tesztet!
4. Gyermekek elől elzárva tartandó!
5. Kizárólag külsőleg, diagnosztikai céllal alkalmazza!
6. Csak akkor nyissa ki a műanyagtasakot, ha az elérte a szobahőmérsékletet, és készen áll a tesztkészülék alkalmazására!

A TESZT MENETE

1. A teszt megkezdéséhez nyissa ki a lezárt tasakot, és vegye ki a tesztkészüléket.
2. Vegye le a kupakját.
3. Tartsa a készülék nyelvét (a készüléket a nyelvénél fogva úgy, hogy a másik vége lefelé mutasson) közvetlenül a vizeletáramban legalább 10 másodpercen keresztül, ameddig az teljesen nedves nem lesz.
4. **Figyelem! Ügyeljen arra, hogy a teszt- és kontrollablakra ne kerüljön vizelet!** Ezt úgy is megteheti, hogy a vizeletét egy tiszta és száraz edénybe gyűjti, majd a készülék nyelvét belemártva tartja legalább 10 másodpercen keresztül.
5. Miután kivette a tesztkészüléket a vizeletéből, azonnal helyezze vissza a kupakját, és fektesse a készüléket egy sima, vízszintes felületre úgy, hogy a teszt- és kontrollablak felfelé nézzen, majd kezdje mérni az időt.
6. Amint a teszt működésbe lép, a teszt- és kontrollablakon áthaladó világosvörös áramlat figyelhető meg. Legalább 5 percet várjon, amíg a vörös vonal/vonalak megjelenik/megjelennek. Ha egyáltalán nem jelenik meg vörös vonal, várjon még egy percet! Egyes esetekben - a HCG-koncentrációtól függően - a pozitív eredmény leolvasható akár egy percen belül is.
7. LEGKÉSBŐB 10 PERCEN BELÜL OLVASSA LE AZ EREDMÉNYT!

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE



**Terhes (pozítív):**

Ha a tesztkészüléken két vörös vonal jelenik meg, az egyik a tesztterületen (az ablak T-vel jelzett részéhez közel), a másik a kontrollterületen (az ablak C-vel jelzett területéhez közel), akkor Ön valószínűleg terhes. A vonalak színének az erőssége eltérhet egymástól, nem kell egyezniük ahhoz, hogy pozitív eredményre utaljanak.



**Nem terhes (negatív):**

Ha csak egyetlen vörös vonal jelent meg a C-vel jelzett kontrollterület mellett, Ön valószínűleg nem terhes.



**Érvénytelen eredmény:**

A teszt érvénytelennek tekintendő, amennyiben a) sem a tesztterület mellett, sem a kontrollterület mellett nem jelenik meg vörös vonal, vagy b) ha a kontrollterületen nem jelenik meg vörös vonal (azaz minden olyan esetben, amikor a kontrollterületen nem látható vonal), amint azt az ábrák mutatják. Ebben az esetben ismételve meg a tesztet egy másik (új) készülékkel.

**Figyelem!**

Ne igyon vizet közvetlenül a teszt megkezdése előtt! A vízfogyasztás a vizeletminta felhígulásához vezethet, és befolyásolhatja a HCG kimutatását. A terhesség ideje alatti alkoholfogyasztás veszélyeztetheti a magzatot!

**Csak in vitro vizsgálatra.**

**Tasak tartalma:**

• 1 db vizeletsugaras teszt

• 1 db nedvszívó

**Óvja a fénytől és a nedvségtől!**

**Tárolási hőmérséklet 2°C- 30°C**

**Gyártó:** AI DE DIAGNOSTIC CO., LTD.

141 Zhu Zhou Road

Qingdao High-Tech Industrial Park

266101 Shandong, P.R.China

**Európai képviselő:**

Shanghai International Holding Corp. GMBH

Eifestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

**Importálja és forgalmazza:**

Lipták Zoltán EV

www.fastest.hu, info@fastest.hu

**A csomagoláson alkalmazott jelölések:**

**LOT** Gyártási szám

Szavatossági idő Hónap/Év

**Cut off** Érzékenység

Olvassa el a használati utasítást

Csak egyszer használható

**IVD** Csak in vitro vizsgálatra

Tárolási hőmérséklet 2°C - 30°C

Tesztek száma csomagonként

**CE**  
0123